


Empreinte optique, protocole


Lancer le logiciel Sirona Connect

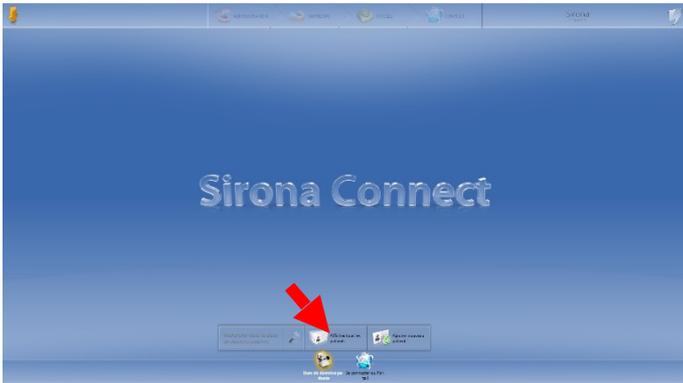

Sélectionner le praticien puis le patient




Ou créer le patient

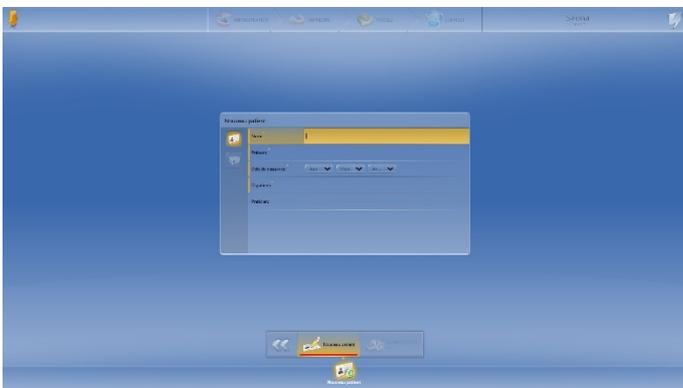


Sélectionner le type de restauration (facultatif)





Sélectionner le maxillaire, la mandibule ou le mordu

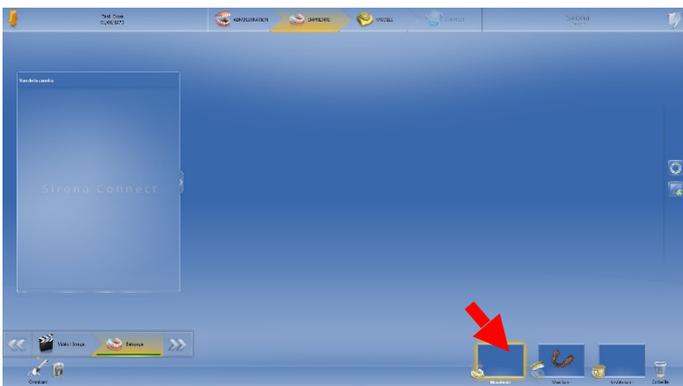

Allumer la caméra

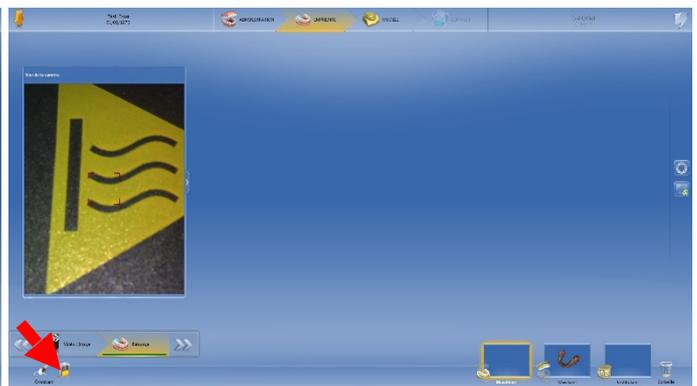


Scanner les faces occlusales, puis linguales puis vestibulaires

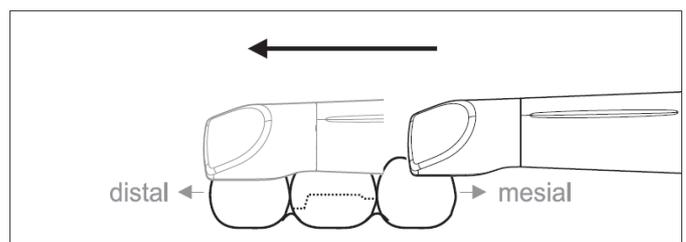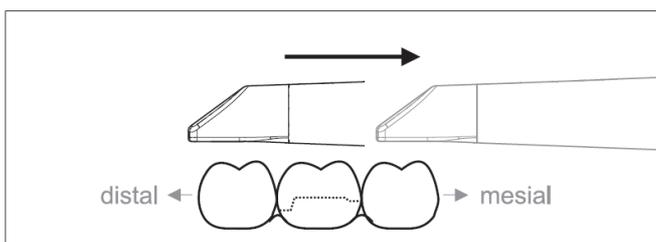

Scanner (mordu validé par carré vert)

Cliquer sur la flèche en haut à gauche, puis exporter

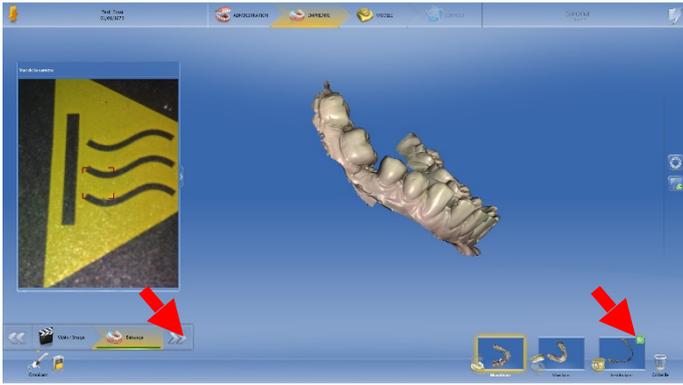

Sélectionner le format stl puis le dossier et exporter



Nom du fichier : n° d'OF puis date en format 2020-12-31

Deux fichiers seront générés, incluant le mordu

Adresser le tout au prothésiste