

Protocole cone beam pré-implantaire

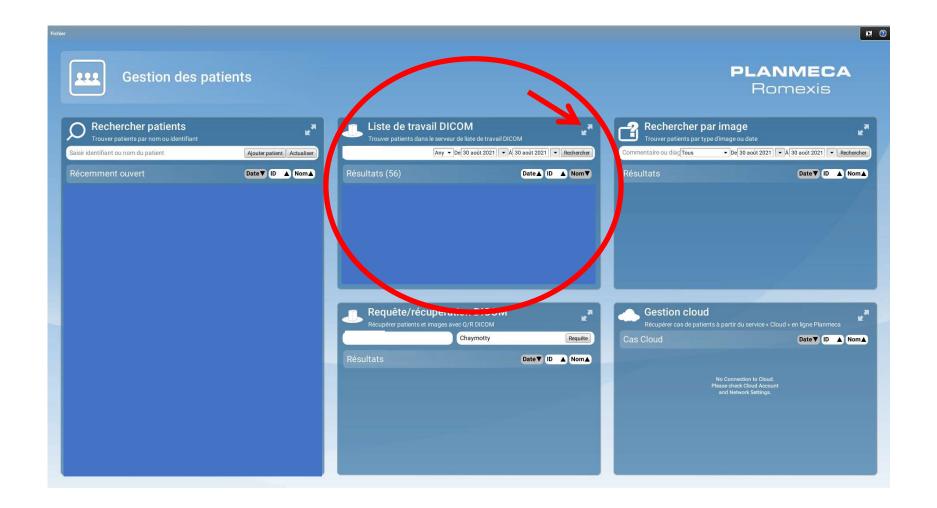

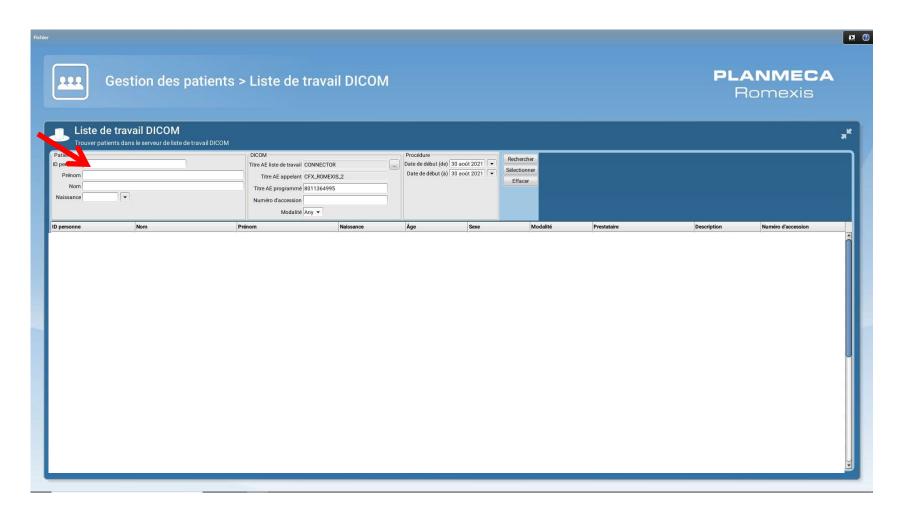






- Asseoir le patient
- Placer des rouleaux de cotons entre les arcades et dans le vestibule
- Positionner le cone beam



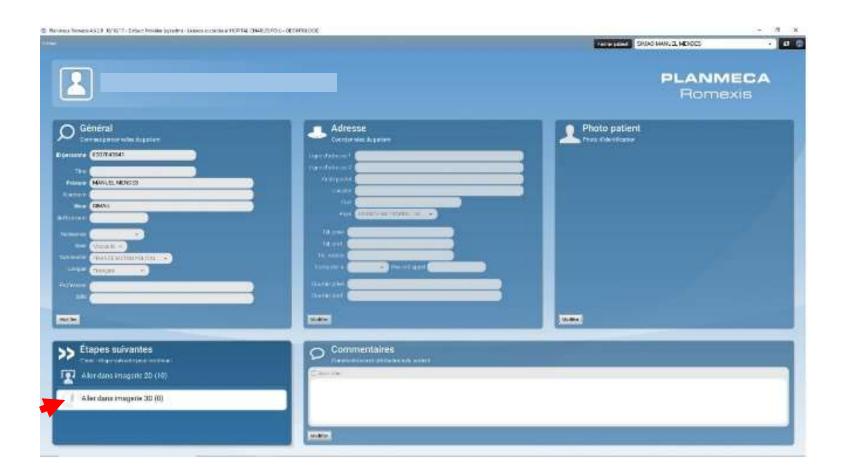




Sur l'écran du cone beam

• Sélectionner dents 3D



- Sélectionner maxillaire ou mandibule
- Réaliser le Scout

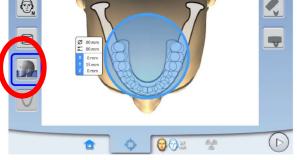




Sur l'écran du cone beam

• Repositionner à l'aide des touches et refaire un scout si nécessaire



• Régler l'acquisition en HD

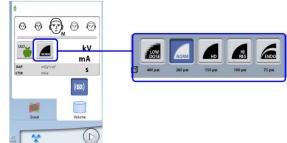



- Sur l'écran d'ordinateur réduction d'artefact sur Mid
- HU correction activé
- Ne pas activer AINO filter





• Lancer l'acquisition

