




Formlabs,  
rinçage

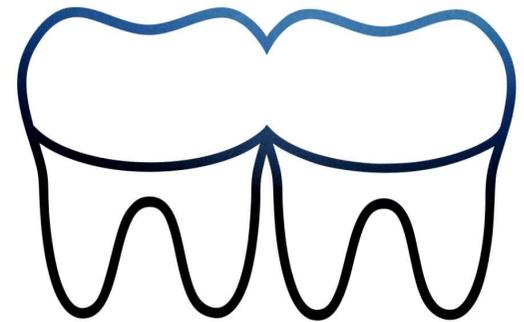


Allumer la cuve : appuyer sur le sélecteur, vérifier le niveau d'alcool isopropylique

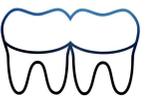


Ouvrir la cuve : sélectionner  
« Open » et appuyer sur le sélecteur

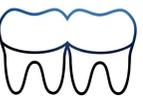

Placer la plate forme à la place de celle rincée et disposer la plate forme propre dans l'imprimante

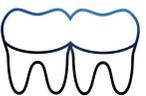


Ajuster la durée selon le type de  
résine utilisée puis sélectionner  
« Start »

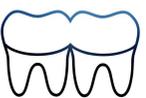

# Récupérer la plate forme, détacher l'objet pour la post-polymérisation

- Les instruments se trouvent dans les rangements sur les côtés du bac de rinçage
- Bien détacher tous les supports de la plate forme
- Nettoyer les instruments avant de les replacer dans leurs logements

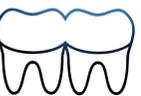

Nettoyer la plate-forme, la replacer  
et fermer la cuve en validant  
« Sleep »

