Primescan, empreinte simple





Avant de déplacer la Primescan, bien vérifier qu'elle est éteinte



Mise en place

Interrupteur sur ON / Brancher (optionnel) / Appui long pour allumer l'ordinateur





Double click sur l'icône SW Connect





Rechercher ou créer le patient







Connect		- a ×
5		Connect SW
	Nom*	
	ID patient*	
	patient Praticien Vom du praticien	
Nouveau patient		
	A	
- 0 Hi - 0 Decement		
🔲 🏸 🔛 🥅 🧰 🕐 Snip & Sketch		K m² (4) [2022 ↓



Choix de la restauration (optionnel)









Avant l'empreinte optique





• Utiliser un écarteur Optragate



 Éteindre le scialytique avant le début de l'empreinte optique

 Attention au sens de la caméra sur le support !



Empreinte numérique



Attention à ne pas mettre en contact le scanner avec les dents pour ne pas rayer la vitre du capteur



La régularité de la musique et la couleur blanche du carré sur l'empreinte indiquent le bon déroulement de l'empreinte



Chemin de scannage



Scanner les faces occlusolinguales puis vestibulaires









Vérification des modèles et cliquer sur le logo de Dentsply





Cliquer sur exporter





Sélectionner le dossier sur le bureau, export au format STL résolution optimale.

Nom de fichier:			
Dossier:	C:\Users\CADCAM\Desktop\souron		
Exporter comme	Fichiers STL	×	
	Résolution de l'exportation du modèle		
	Résolution optimale, fichier de gran	de taille (100	
	Résolution modérée et taille de fichie	er (75% de to	
	Résolution réduite, petit fichier (25%	de tous I	
	Appular	aartar	



Mettre en place une clef USB et copier les fichiers .stl sur la clef

Seules les clefs USB des enseignants ou internes peuvent être utilisées.





Copier les deux fichiers .stl



L'enregistrement de l'occlusion est intégré au fichier de la mandibule.



Ne pas oublier d'enregistrer avant de fermer le programme !

	C	onnect		
	La	a restauration actu	elle n'est pas enregist	trée. L'enregistrer
(i)	, , m	iaintenant?		
U				
		Epregistrer	Ne pas	Appular
		Linegistier	EDUNIO ODEO OF	Annoici



Décontamination

 Nettoyage : uniquement avec le produit autorisé : sensitive wipes Dürr dental





Débrancher et éteindre l'ordinateur

Débrancher et éteindre l'ordinateur

