
Primescan, empreinte simple

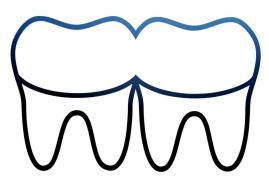

Avant de déplacer la Primescan, bien vérifier qu'elle est éteinte



Mise en place

Interrupteur sur ON / Brancher (optionnel) / Appui long pour allumer l'ordinateur






Double click sur l'icône SW Connect






Rechercher ou créer le patient

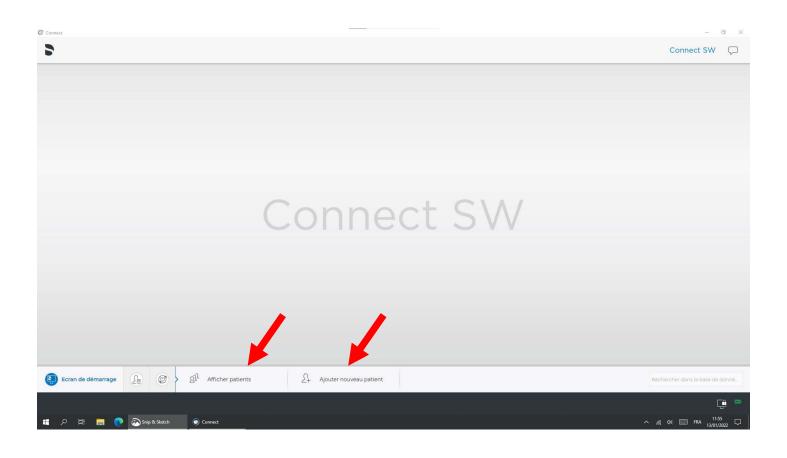




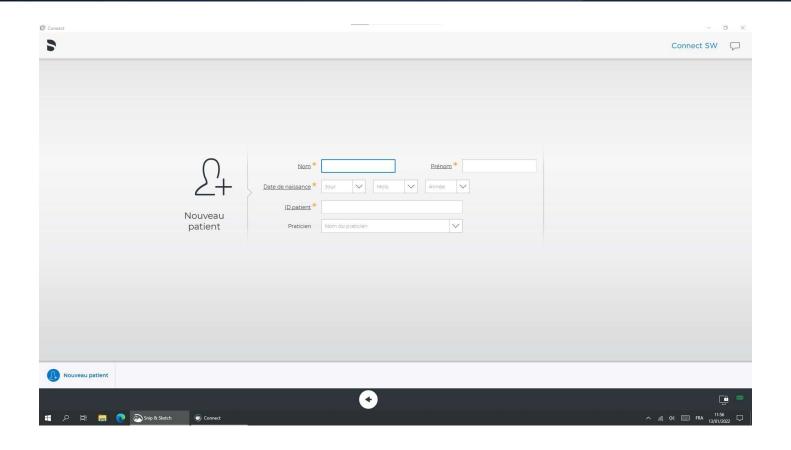




Choix de la restauration (optionnel)

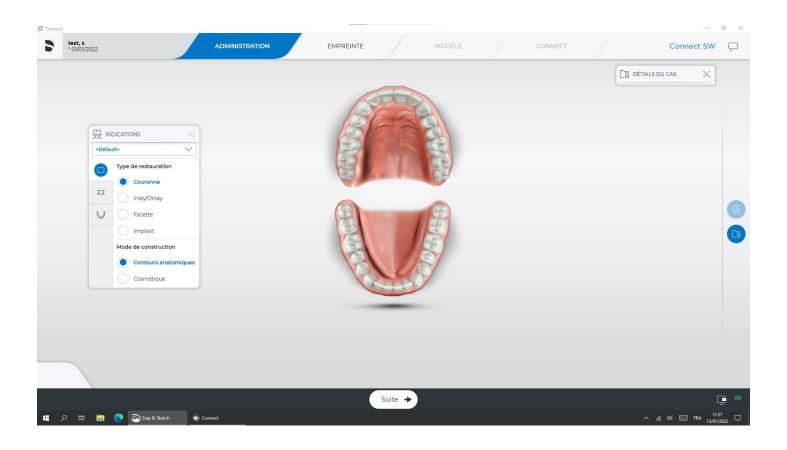



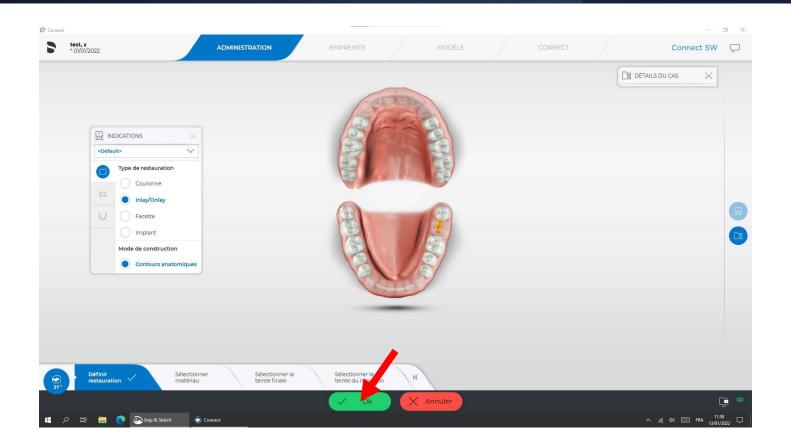



Avant l'empreinte optique



 Attention au sens de la caméra sur le support!



Utiliser un écarteur
Optragate



 Éteindre le scialytique avant le début de l'empreinte optique



Préhension de la caméra

• Comment tenir la caméra...






Empreinte numérique




Attention à ne pas mettre en contact le scanner avec les dents pour ne pas rayer la vitre du capteur

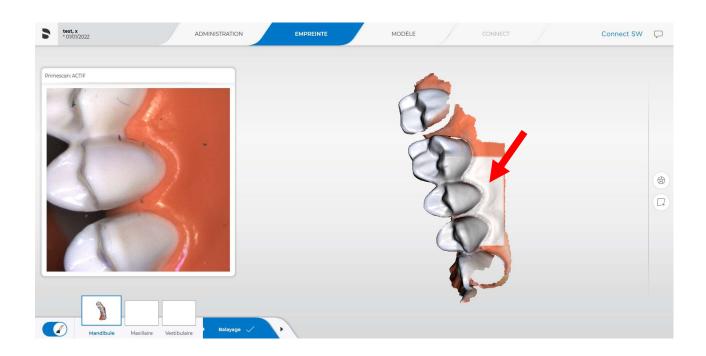


La régularité de la musique et la couleur blanche du carré sur l'empreinte indiquent le bon déroulement de l'empreinte




Chemin de scannage

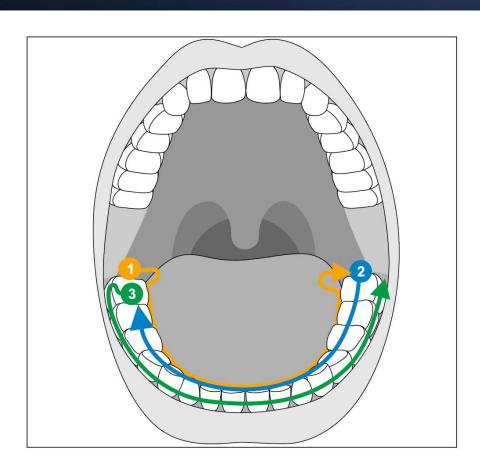


Scanner les faces occlusolinguales puis vestibulaires

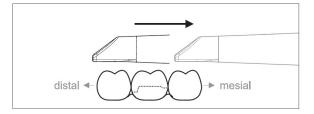

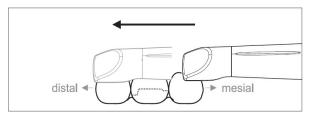



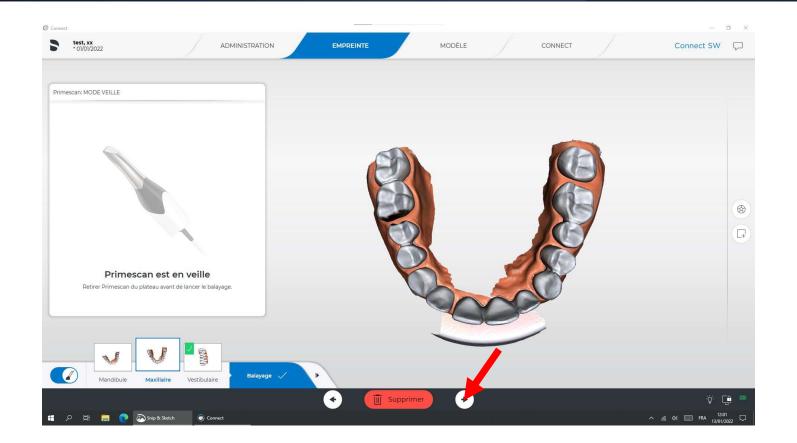




Vérification des modèles et cliquer sur le logo de Dentsply






Cliquer sur exporter

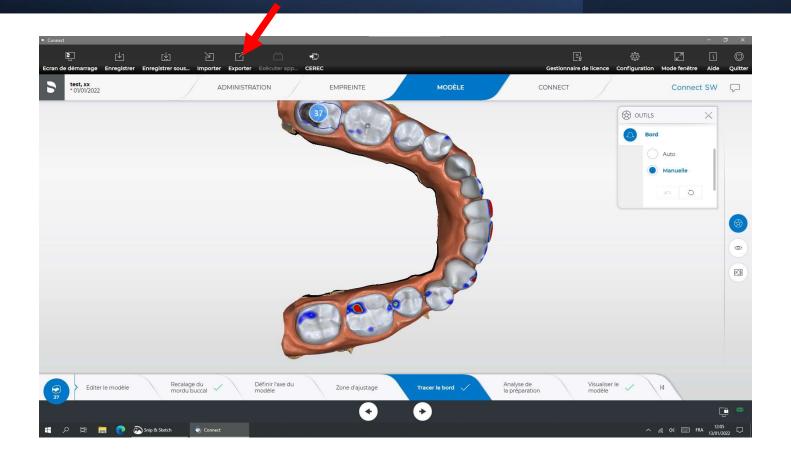



Sélectionner le dossier sur le bureau, export au format STL résolution optimale.

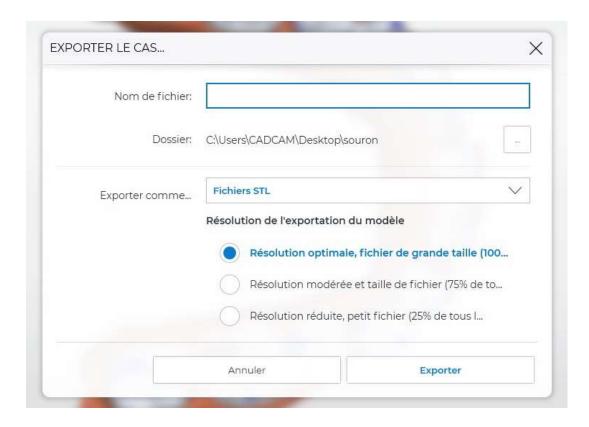




Mettre en place une clef USB et copier les fichiers .stl sur la clef

Seules les clefs USB des enseignants ou internes peuvent être utilisées.





Copier les deux fichiers .stl

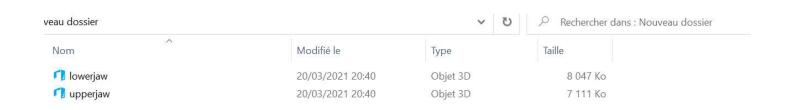

L'enregistrement de l'occlusion est intégré au fichier de la mandibule.



Ne pas oublier d'enregistrer avant de fermer le programme !





Décontamination

- Nettoyage:
 uniquement avec le
 produit autorisé: FD
 366 sensitive wipes
 Dürr dental.
- Éléments à nettoyer :
 - Caméra
 - Ecran
 - Touchpad





Débrancher et éteindre l'ordinateur

Débrancher et éteindre l'ordinateur

